



# AftaCare

**Curativo para Aftas**

## **INSTRUÇÕES DE USO**

AftaCare é uma película protetora que reduz os incômodos causados pelas aftas e pelas lesões da mucosa oral.

O principal mecanismo de ação de AftaCare no alívio da dor é decorrente da sua capacidade de aderir à superfície lesada, adotando a conformação da lesão e protegendo-a contra contaminação e irritação por formar uma barreira protetora temporária similar à mucosa normal.

## **O QUE SÃO AFTAS?**

O termo afta tem origem no grego e significa úlcera. De acordo com as descrições médicas, as aftas são feridas pequenas que acometem a mucosa oral, com tendência à recorrência e que aparecem subitamente, provocando importante desconforto local.

Geralmente estas feridas são pequenas (menos de 1 cm de diâmetro), cobertas por uma membrana esbranquiçada e circundadas por bordas avermelhadas.

## **QUAL A CAUSA DAS AFTAS?**

As aftas não têm até o momento uma causa definida, embora já tenham sido correlacionadas com tendências hereditárias e algumas doenças, como anemia por deficiência de ácido fólico ou ferro.

Existem vários fatores que são descritos na literatura médica como capazes de desencadear recorrência de aftas, como por exemplo: menstruação, trauma e stress, embora em muitos pacientes não seja possível relacionar um fator precipitante.

## **QUAL A DURAÇÃO DAS AFTAS?**

Geralmente as aftas têm seu curso restrito a alguns dias, resolvendo-se completamente em torno de 2 semanas. Caso haja persistência das lesões, recomenda-se uma nova avaliação médica.

## **QUE CUIDADOS GERAIS DEVEMOS TOMAR?**

De uma forma geral os pacientes devem evitar alimentos que percebem piorar ou desencadear as lesões, como por exemplo, alimentos duros (como torradas), alimentos ou bebidas ácidas, salgados ou picantes, além de bebidas alcoólicas.

## **QUAIS AS RECOMENDAÇÕES PARA PACIENTES COM FERIDAS NA CAVIDADE ORAL?**

Existem algumas doenças que podem apresentar sintomas semelhantes aos das aftas. É importante uma avaliação médica para o correto diagnóstico das lesões.

## **APRESENTAÇÕES:**

AftaCare apresenta-se como uma película no formato de discos nos tamanhos de 1,0 cm, 1,5 cm, 2,0 cm, 2,5 cm, 3,0 cm, 4,0 cm e 5,0 cm de diâmetro, embalados em unidades individuais compostas por PET especial, acondicionadas em cartuchos de cartolina. Cada embalagem de AftaCare possui 01, 05, 10, 15, 20, 30 ou 50 unidades.


## **INDICAÇÕES:**

AftaCare é indicado para lesões de mucosa secundárias à radioterapia ou quimioterapia, estomatite, irritação relacionada à cirurgia oral, úlceras traumáticas, lesões secundárias a próteses dentárias ou aparelhos de correção, úlceras aftosas ou outras doenças ou condições das superfícies mucosas.

## **COMPOSIÇÃO:**

Maltodextrina, polivinilpirrolidona (PVP), hialuronato de sódio, hidroxietilcelulose e glicerina.

## **INSTRUÇÕES DE USO:**

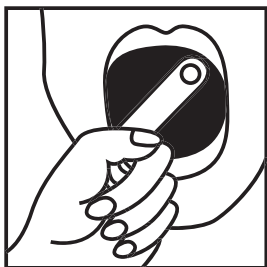

Assegure-se de que suas mãos estejam limpas e secas antes de manipular o produto. Remova uma película de AftaCare da embalagem e posicione sobre a lesão, previamente umedecida com saliva, por alguns segundos. Para facilitar a adesão, passe a língua úmida sobre o produto após a aplicação. Depois de alguns segundos, a película irá aderir completamente à lesão, protegendo-a contra contaminação ou irritação. O tratamento pode ser realizado sempre que necessário. Recomenda-se a aplicação do produto 5 minutos antes da ingestão de alimentos.

O AftaCare adere à área lesada e a protege contra irritação e contaminação locais.

## **ADVERTÊNCIAS E CONTRAINDICAÇÕES:**

**A administração de AftaCare é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes de sua formulação.**

**Não deve ser usado em crianças pelo risco de aspiração do produto.**

**AftaCare é seguro, caso ingerido.**

**Descontinue o uso caso haja sinais de irritação.**

**Não utilizar após a data de validade descrita na embalagem.**

## **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:**

**Armazenar e transportar à temperatura ambiente (15°C a 30°C).**

**PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO**

---

Produzido por: Silvestre Labs Química e Farmacêutica Ltda.  
Av. Carlos Chagas Filho, 791, Bio-Rio, Cidade Universitária  
Ilha do Fundão - Cep: 21941-904 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
CNPJ: 33.019.548/0001-32

Tel: +55 (21) 2142-7777 - Fax: +55 (21) 2142-7734

[www.silvestrelabs.com.br](http://www.silvestrelabs.com.br)

[silvestrelabs@silvestrelabs.com.br](mailto:silvestrelabs@silvestrelabs.com.br)

Farmacêutica Responsável:

Dra. Tatiana Siqueira de Lima Corrêa

CRF-RJ: 7426

Registro ANVISA: 10328890006

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**



**SILVESTRE**

FONE

(90xx21) 2142-7777